



Le pansement de première intention pour déterger et assainir les plaies en douceur


Indications

Plaies exsudatives ou sèches, infectées ou non, plaies stagnantes : Ulcère, escarre, pied diabétique, kyste pilonidal, plaie traumatique et plaie post-opératoire en retard de cicatrisation.

Composition

ENVELOPPE DOUCE ET SOUPLE

Côté rayé externe à la plaie

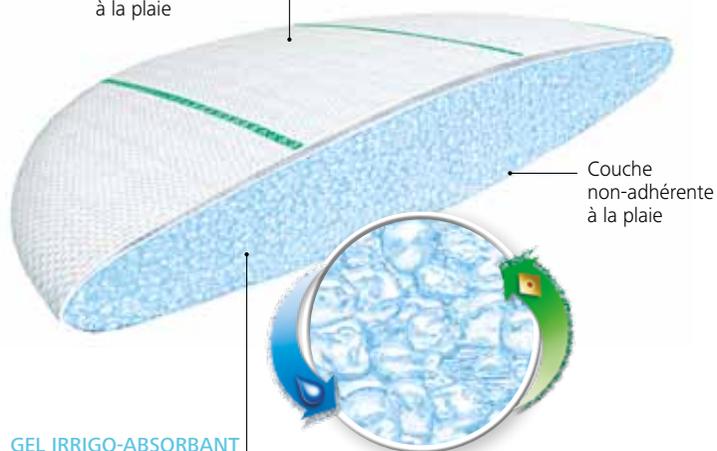

Couche non-adhérente à la plaie

GEL IRRIGO-ABSORBANT

(Particules de polyacrylate superabsorbant imprégnées de solution de Ringer)



Mode d'action de l'irrigo-absorbant



1 • Déterge

Efficacement fibrine et nécrose par son action irrigo-absorbante



2 • Assainit

En captant et piégeant les bactéries, levures et protéines inhibitrices de la cicatrisation



3 • Stimule

Le bourgeonnement plus rapidement que d'autres pansements⁽¹⁾



voir la vidéo

Les plus pour vos patients

- Élimine plus efficacement les **tissus nécrotiques** et la **fibrine**⁽¹⁾
- Contrôle l'exsudat
- Relance la cicatrisation
- Piège les **bactéries**
- Minimise les **odeurs**

Un choix de formats pour s'adapter aux différentes tailles de plaies



PLAIES SUPERFICIELLES, PEU PROFONDES

HydroClean®



Ø 4 cm



Ø 5,5 cm



Ovale 4 x 7 cm



Carré 7,5 x 7,5 cm



Carré 10 x 10 cm



PLAIES PROFONDES, CAVITAIRES

HydroClean® Cavité



Ø 4 cm



Ø 5,5 cm



Ovale 4 x 7 cm



Carré 7,5 x 7,5 cm



Carré 10 x 10 cm



(1) Étude Cleansite : effet détersif 2,5 x supérieur versus hydrogel sur des ulcères fibrino-nécrotiques après 14 jours de traitement. Publication en cours.

Conseils pour l'application

PLAIES SUPERFICIELLES,
PEU PROFONDES

HydroClean®

- Choisir le format HydroClean® adapté à la plaie.
- Recouvrir de compresses.
- Fixer avec une bande légère cohésive type Peha-haft® ou bande adhésive type Omnifix®.



PLAIES PROFONDES,
CAVITAIRES

HydroClean® Cavité

- Choisir le format HydroClean® Cavité adapté à la plaie.
- Il est possible de superposer plusieurs pansements pour combler la cavité.
- Recouvrir d'un film de polyuréthane adhésif type Hydrofilm®.



Protection de la peau péri-lésionnelle

Avec une pommade type vaseline ou cold cream.



Renouvellement conseillé
toutes les 24 heures

Prescrire

PLAIES SUPERFICIELLES, PEU PROFONDES

HydroClean®



Taille	Nbre pièces/boîte	EAN	LPPR*
Ø 4 cm	10	4049500890014	26,40 €
Ø 5,5 cm	10	4049500890021	29,30 €
ovale 4 x 7 cm	10	4049500890328	29,30 €
7,5 x 7,5 cm	10	4049500890038	29,30 €
10 x 10 cm	10	4049500890045	29,30 €



PLAIES PROFONDES, CAVITAIRES

HydroClean® Cavité



Taille	Nbre pièces/boîte	EAN	LPPR*
Ø 4 cm	10	4049500890090	26,40 €
Ø 5,5 cm	10	4049500461016	29,30 €
ovale 4 x 7 cm	10	4049500890342	29,30 €
7,5 x 7,5 cm	10	4049500461030	29,30 €
10 x 10 cm	10	4049500461054	29,30 €



Téléchargez l'application smartphone !

flashez ce code



HydroClean® et HydroClean® Cavité

DM de classe : IIb - Fabricant : PAUL HARTMANN AG - Organisme notifié : CE 0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l'étiquetage). *Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur : www.ameli.fr.

Date de modification du document : février 2014.

Pour toutes informations techniques contactez notre infirmière conseil au :

N° Vert 0 800 17 37 57

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE.

et visitez également notre site : www.hartmann.fr

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl • 9, route de Sélestat • Châtenois • 67607 SÉLESTAT Cedex FRANCE

HydroClean® HydroClean® Cavité

Pansements irrigo-absorbants.

OBJECTIF
DÉTERGER
& ASSAINIR



HydroTherapy
Efficacité. Et Simplicité.

HARTMANN