

En bref

Désignation	Dimensions totales	Dimensions du coussinet	Nbre pièces /boîte
Prêt-à-poser			
HydroTac. Comfort (adhésif)  LPPR*	8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	10 ou 16
	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	10 ou 16
	6,5 x 10 cm	2,5 x 6 cm	10
	10 x 20 cm	5 x 14 cm	10
à 	15 x 20 cm	9 x 14 cm	10
Spécial région lombo-sacrée			
HydroTac. Sacral (adhésif)  LPPR*	18 x 18 cm	13 x 10,6 cm	10
	à 		
Peau péri-lésionnelle fragilisée			
HydroTac. (non adhésif)  LPPR*	12,5 x 12,5 cm	-	10 ou 16
	15 x 20 cm	-	10
à 			
Spécial talon et coude			
HydroTac. Concave (non adhésif)  LPPR*	18 x 18,5 cm	-	10
	à 		
Peau péri-lésionnelle fragilisée			
HydroTac. transparent (non adhésif)  LPPR*	5 x 7,5 cm	-	10
	10 x 10 cm	-	10
	10 x 20 cm	-	10
	20 x 20 cm	-	10
à 			
Prêt-à-poser			
HydroTac. transparent Comfort (adhésif)  LPPR*	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	10
	10 x 20 cm	5 x 14 cm	10
à 			

DM de classe : IIb - Fabricant : PAUL HARTMANN AG - Organisme notifié : CE 0123
 Lire attentivement les instructions figurant dans la notice (et/ou sur l'étiquetage).
 Date de création du document : mars 2013 - *Ces produits peuvent être pris en charge sous certaines conditions, consultez-les sur : www.ameli.fr.

Pour toutes informations techniques
 contactez notre infirmière conseil au :

 **N° Vert 0 800 17 37 57**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

et visitez également notre site : www.hartmann.fr

Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl • 9, route de Sélestat • Châtenois • 67607 SÉLESTAT Cedex FRANCE

HydroTac®

HydroTac® transparent

Pansements hydro-apaisants.

**OBJECTIF
CICATRISER**



HydroTherapy
 Efficacité. Et Simplicité.


HARTMANN


Plaies traumatiques, post-opératoires, dermabrasions, brûlures, ulcères, escarres.

HydroTac® Comfort **Prêt-à-pos**

GEL HYDRO-APAISANT

Polyuréthane
+ 45 % Eau

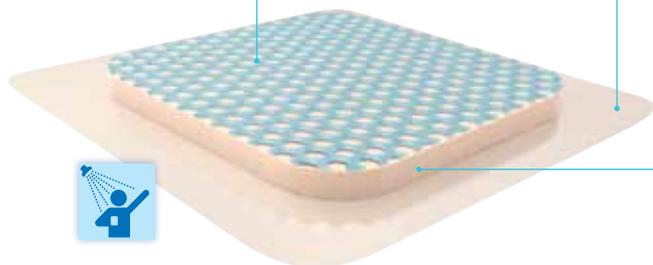

FILM ADHÉSIF EXTRA-FIN


- Ne roule pas
- Étanche

MOUSSE ABSORBANTE



→ Version **non adhésive**, découpable, pour les peaux péri-lésionnelles fragilisées :

HydroTac®

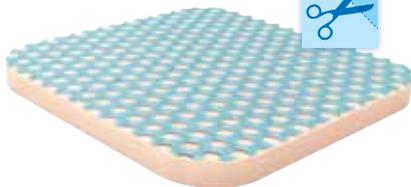

Prescrire

Prêt-à-pos

HydroTac® Comfort
(adhésif)

Exsudats :



→ Les plus pour vos patients

- Absorption et cicatrisation en milieu humide
- Frais, apaisant dès son application
- Favorise des retraits atraumatiques et sans douleur

Renouvellement conseillé
tous les 2 à 3 jours



Prêt-à-pos



Peau péri-lésionnelle fragilisée

HydroTac®
(non adhésif)

Exsudats :



Fixer avec une
bande ou un jersey




Spécial région lombo-sacrée

HydroTac® Sacral

BORDURE ADHÉSIVE ULTRA-MINCE

- Ne roule pas
- Étanche

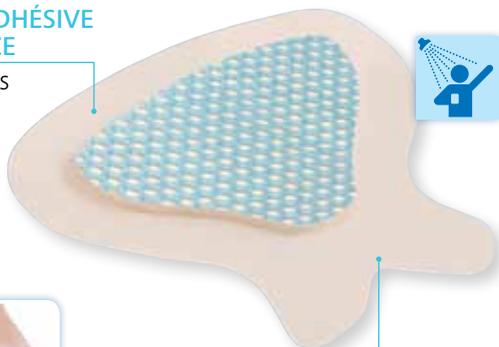

FORME ANATOMIQUE
AVEC DÉCOUPE
OPTIMISÉE

Les plus pour vos patients

- Système de pose simplifié
- Respect des règles d'asepsie
- Ne colle pas aux gants

Prescrire

Spécial région lombo-sacrée

HydroTac® Sacral
(adhésif)

à à à

LPPR®




Renouvellement conseillé
tous les 2 à 4 jours

Spécial zones en relief

HydroTac® Concave

FORME ANATOMIQUE AVEC DÉCOUPE 3D

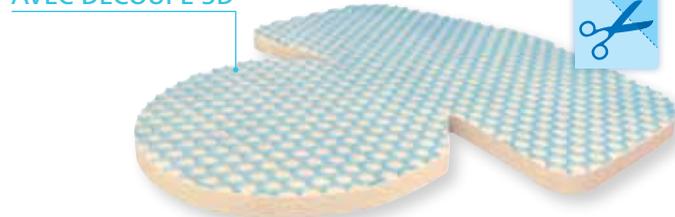

Les plus pour vos patients

- Application simple
- Polyvalent
- Protège contre les chocs

Prescrire

Spécial talon, coude, genou...

HydroTac® Concave
(non adhésif)

à à à

LPPR®




Fixer avec une bande
ou un jersey

Renouvellement conseillé
tous les 2 à 4 jours

Plaies à tendance sèche :
Brûlures superficielles, dermabrasions...

HydroTac® transparent

FILM PROTECTEUR
TRANSPARENT

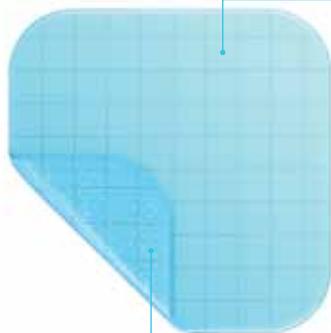


GEL
HYDRO-APAISANT

Existe aussi en version adhésive :

Prêt-à-poser

HydroTac® transparent Comfort

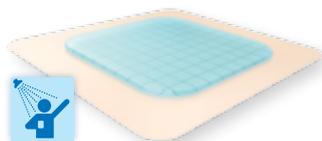

Les plus pour vos patients

- Frais, apaise dès son application
- Hydro-régulation de la plaie
- Économique : reste en place plusieurs jours sans adhérer à la plaie
- Ne laisse aucun résidu

Renouvellement conseillé
tous les 2 à 4 jours



mais aussi :
Plaies en fin de cicatrisation

et :
Protection des lésions
cutanées radio-induites



Prescrire

Peau péri-lésionnelle fragilisée

HydroTac® transparent

(non adhésif)

Exsudats :

à ✗

Fixer avec une
bande ou un jersey



Prêt-à-poser

HydroTac® transparent Comfort

(adhésif)

Exsudats :

à ✗

