

RespoSorb® Super

Pansement superabsorbant stérile non adhérent



Référence	Taille ou dimensions
685020	10 x 10 cm
685021	10 x 20 cm
685022	15 x 20 cm
685023	20 x 25 cm
685024	20 x 40 cm

Produit


RespoSorb® Super est un pansement superabsorbant stérile composé de 4 couches de matériaux différents, très doux et non adhérent à la plaie, permettant un drainage efficace des plaies présentant des exsudats abondants.

Indications / Classification

RespoSorb Super est particulièrement adapté au traitement des plaies superficielles, très exsudatives, aiguës ou chroniques (par exemple les escarres de décubitus, les ulcères de jambe, les tumeurs ulcérées, etc.).

RespoSorb® Super est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

Spécifications

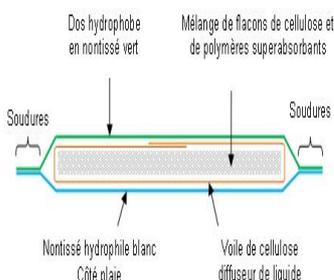

Composition :

- Une couche en nontissé hydrophile en viscose / polyamide qui limite l'adhérence à la plaie
- Une couche en cellulose hydrophile destinée à diffuser de manière uniforme les liquides
- Une couche superabsorbante constituée de flocons de cellulose mélangés à des polymères polyacrylates superabsorbants permettant l'absorption et la rétention des exsudats
- Une couche externe constituée d'un nontissé en polypropylène, de couleur verte, hydrophobe, mais perméable à l'air et aux échanges gazeux.

Caractéristiques :

Capacité d'absorption : minimum 140 g/100cm² de coussin absorbant (norme NF EN 13726-1 chapitre 3.2)

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
685020	10 x 10 cm	Dimensions du pansement : 12 x 12 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 10 x 10 cm environ
685021	10 x 20 cm	Dimensions du pansement : 12 x 22 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 10 x 20 cm environ
685022	15 x 20 cm	Dimensions du pansement : 17 x 22 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm environ
685023	20 x 25 cm	Dimensions du pansement : 22 x 27 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 20 x 25 cm environ
685024	20 x 40 cm	Dimensions du pansement : 22 x 42 cm environ Dimensions du coussin absorbant : 20 x 40 cm environ

Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement (sauf le format 20 x 40 cm).

Absence de colophane.



Présentation / Conditionnement

Unitaire sous pochette pelable papier / papier (excepté pour le format 20 x 40 cm : emballé sous blister papier / film).

Conditionnés en boîte, puis en carton.

Accompagné d'une notice d'emploi.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / blister	Nb unités / pochette	Nb blisters / boîte	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
685020	10 x 10 cm	/	1	/	10	6	88
685021	10 x 20 cm	/	1	/	10	6	64
685022	15 x 20 cm	/	1	/	10	6	42
685023	20 x 25 cm	/	1	/	10	6	28
685024	20 x 40 cm	1	/	10	/	5	24

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions blister	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
685020	10 x 10 cm	/	190 x 162 x 6 mm	169 x 70 x 206 mm	350 x 218 x 224 mm	1200 x 800 x 1937 mm
685021	10 x 20 cm	/	290 x 162 x 6 mm	180 x 70 x 294 mm	600 x 192 x 224 mm	1200 x 800 x 1937 mm
685022	15 x 20 cm	/	290 x 212 x 6 mm	219 x 81 x 294 mm	600 x 231 x 270 mm	1200 x 800 x 1944 mm
685023	20 x 25 cm	/	350 x 262 x 6 mm	269 x 81 x 354 mm	550 x 366 x 257 mm	1200 x 800 x 1944 mm
685024	20 x 40 cm	290 x 140 x 40 mm	/	280 x 143 x 292 mm	727 x 300 x 294 mm	1200 x 800 x 1909 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans après la date de fabrication.

Précautions d'emploi

Tout traitement de plaies dont le processus cicatriciel est perturbé doit être précédé d'un examen médical visant à évaluer l'état de la plaie et à déterminer l'origine du retard de cicatrisation. Le traitement avec RespoSorb Super ne remplace pas un traitement étiologique des troubles de la cicatrisation. Le scellage (bande bleue) du sachet pelable de ce produit contient du latex naturel susceptible de provoquer des réactions allergiques. Ne pas découper.

Contre-indications

Ne pas utiliser RespoSorb Super sur les plaies sèches, ainsi que sur les plaies ouvertes laissant apparaître les structures osseuses, musculaires et tendineuses. RespoSorb Super ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des composants.

Conseils d'utilisation

Choisir RespoSorb Super en fonction de la taille de la plaie afin que le pansement dépasse les bords de la plaie d'au moins 1 ou 2 cm. Le pansement ne doit pas être découpé. Poser RespoSorb Super sur la plaie du côté blanc de manière à ce que le nontissé spécial vert se trouve du côté opposé à la plaie. Fixer le pansement, par exemple avec un pansement adhésif ou des bandes de fixation, ou le cas échéant avec des bandes de compression.

Les renouvellements de pansements se font selon les indications cliniques ou si les sécrétions atteignent les bordures du pansement ou traversent le nontissé vert.

En cas de plaies infectées, il est possible d'associer le produit avec Atrauman Ag.

Lorsque le volume des sécrétions diminue, il est recommandé d'utiliser un pansement hydroactif adapté (par exemple HydroTac).