

Hydrofilm® ROLL

Pansement transparent auto-adhésif en rouleau



Référence
685791

Taille ou dimensions
10 cm x 2 m

Code ACL
6066968

Produit

Hydrofilm® ROLL est un film non stérile auto-adhésif composé d'un film en polyuréthane, semi-perméable, étanche et transparent.

Il permet ainsi les échanges gazeux et protège de la pénétration bactérienne.

La couche adhésive hypoallergénique assure une bonne adhérence, même sur les zones coniques du corps. Le film peut être coupé à la longueur nécessaire et être retiré sans douleur, sans laisser de résidus.

Les pansements Hydrofilm® ROLL sont conformes à la LPPR.

Indications / Classification

Hydrofilm® ROLL est un film protecteur pour la fixation de pansements primaires.

Hydrofilm® ROLL est un dispositif médical de classe I.

Spécifications



Composition :

- film de polyuréthane auto-adhésif semi-perméable transparent revêtu d'un adhésif acrylique hypoallergénique
- système d'application en 2 étapes : 2 applicateurs N° 1 en papier siliconé, 2 applicateurs N° 2 en polyester

Caractéristiques :

Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR)
(NF EN 13726-2) : 700 - 800 g/m²/24 h.

Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement

Présentation unitaire en boîte elles-mêmes conditionnées en carton.

Instructions de pose imprimées sur la boîte.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton
685791	10 cm x 2 m	1	24
Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions boîte	Dimensions carton
685791	10 cm x 2 m	104 x 45 x 45 mm	223 x 151 x 200 mm



Péremption

Durée de vie : 5 ans.

Précautions d'emploi

Raser les parties du corps très poilues avant d'appliquer Hydrofilm® ROLL.

Contre-indications

Hydrofilm® ROLL ne doit pas être utilisé sur des plaies cliniquement infectées, saignantes ou sécrétant fortement.